

# オートショック AEDについて

## オートショック AEDとは

ショックボタンを有さない自動体外式除細動器（以下 オートショック AED）の販売（令和3年8月から）が開始されています。

## オートショック AEDについて

オートショック AEDは、傷病者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され除細動の要否を判断する点については、従来のショックボタンを有する除細動器と同様ですが、除細動が必要と判断された場合には、傷病者から離れるよう音声ガイダンスが流れ、カウントダウン（例：スリー、ツー、ワン）又はブザーの後に除細動（電気ショック）が自動的に実施されます。

## オートショック AEDの使用上の注意点

オートショック AEDにはショックボタンがありません。そのため、除細動ショックの際に患者から離れることが遅れた場合、放電エネルギーにより感電するおそれがあります。

## オートショック AEDのロゴについて

以下のステッカーが貼付されている AED は、ショックボタンがなく自動的に電気ショックが行われますので、音声ガイダンスをよく聞いて操作するようにしてください。



画像提供：JEITA 一般社団法人 電子情報技術産業協会

詳しくオートショック AED の事を知りたい方は、下記の PDF を御覧ください。

参考：厚生労働省からの通知文

[ショックボタンを有さない自動体外式除細動器（オートショック AED） 使用時の注意点に関する情報提供等の徹底について](#)